



Blutzuckermessen auf den Kopf gestellt

NEU

Accu-Chek® Guide:
Smart und einfach praktisch.

ACCU-CHEK®

Smarte Lösungen, die das Blutzuckermessen erleichtern



Messen bei Dunkelheit

Das neue Accu-Chek® Guide Blutzuckermessgerät besitzt ein helles Display sowie eine **Teststreifenbeleuchtung**.



Behutsames Stechen

Blutgewinnung mit nur einem Klick mit der Accu-Chek FastClix Stechhilfe.




Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können¹

Genauer als die heutige ISO-Norm verlangt*.



Ihre Daten – alle an einem Ort

Übersicht Ihrer Werte auf dem Smartphone – Zugriff über die Accu-Chek Connect App jederzeit und überall.

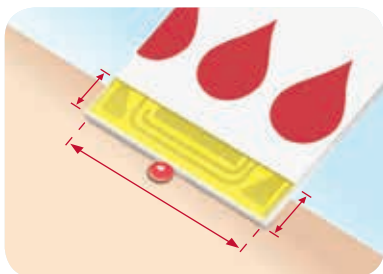

Schwer zu verfehlen

Tragen Sie **einen kleinen Blutstropfen an einer beliebigen Stelle** auf den gelben Rand der grossen und saugstarken Auftragsfläche auf.



Hygienischer Streifenauswurf

Dank des **Streifenauswurfknopfes** genügt ein einziger Knopfdruck für einen schnellen und hygienischen Auswurf.

Durchführen einer Blutzuckermessung



1 Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser und Seife und trocknen Sie Ihre Hände gründlich ab.



2 Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum auf der Teststreifendose. Verwenden Sie keine Teststreifen, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.



3 Schieben Sie **mit dem Daumen** einen Teststreifen mit leichtem Druck nach oben und entnehmen Sie ihn. Verschiessen Sie danach den Deckel wieder fest.



4 Führen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung ein. Das Gerät schaltet sich dadurch automatisch ein.



5 Berühren Sie mit dem gelben Rand des Teststreifens den Blutropfen. Tragen Sie das Blut nicht auf die Oberseite des Teststreifens auf. Nehmen Sie den Finger vom Testfeld weg, sobald **Messung wird durchgeführt** auf dem Display erscheint.



6 Der Messwert erscheint innerhalb von 4 Sekunden. Falls Sie diesen Wert markieren möchten, drücken Sie die Taste **OK**. Ansonsten gehen Sie zu Schritt 8.



7 Drücken Sie auf die Taste ▼, um die gewünschte Markierung auszuwählen. Drücken Sie auf **OK** um die Markierung dem Messwert hinzuzufügen.



8 Drücken Sie diese Taste um den Teststreifen aus dem Gerät auszuwerfen. Drücken Sie 3 Sekunden auf die Taste **OK** oder warten Sie 15 Sekunden: das Gerät schaltet sich aus.

Oft sind es die kleinen Dinge ...

... die Blutzuckermessen zu einem Problem machen. **Schnell den Teststreifen entnehmen wollen, unauffällig** bei ungünstigen Lichtverhältnissen messen, das kleine **Messfeld nicht treffen, die Messwerte** per Hand **notieren**, ... all dies kann eine echte Herausforderung bedeuten.

Das neue Accu-Chek® Guide System wurde entwickelt, um die Unannehmlichkeiten der täglichen Blutzuckermessung zu verringern – ob Sie auf dem Weg zu Arbeit sind, im Freien das Leben genießen oder Zeit mit Ihrer Familie verbringen.



Accu-Chek® Guide

Smart und einfach praktisch.



Mehr über das smarte und einfach praktische Accu-Chek Guide System erfahren Sie auf www.accu-chek.ch/guide.

* 95% der mit drei Teststreifen-Chargen gemessenen individuellen Glukosewerte liegen bei Glukosekonzentrationen < 5,6 mmol/L (100 mg/dL) innerhalb $\pm 0,56$ mmol/L (10 mg/dL) und bei Glukosekonzentrationen $\geq 5,6$ mmol/L (100 mg/dL) innerhalb $\pm 10\%$ der mit der Referenzmethode des Herstellers gemessenen Werte.

1 Brazg RL, et al. New Generation Blood Glucose Monitoring System Exceeds International Accuracy Standards. J Diabetes Sci Technol. June 2016.

Experience what's possible.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK FASTCLIX und ACCU-CHEK CONNECT sind Marken von Roche. © 2016 Roche

www.accu-chek.ch

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz



ACCU-CHEK®