



NUOVO

Ribaltiamo la misurazione della glicemia

Accu-Chek® Guide:
Intelligente e semplicemente pratica.

ACCU-CHEK®

Soluzioni sorprendentemente intelligenti per rendere più facile la misurazione della glicemia



Misurazione al buio

Il nuovo misuratore di glicemia Accu-Chek® Guide è dotato di uno schermo luminoso e di una **illuminazione delle strisce reattive**.



Puntura delicata

Prelevare il sangue con un solo click con il pungidito Accu-Chek FastClix.




Risultati di cui ti puoi fidare¹

Precisione superiore a quanto richiesto dalla attuale norma ISO*.



Tutti i tuoi dati - in un solo posto

Panoramica dei tuoi valori sullo smartphone – accesso sempre e ovunque tramite la App Accu-Chek connect

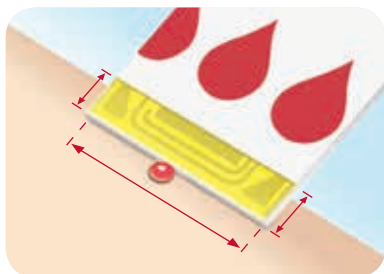

Difficile sbagliare

Deporre **una gocciolina di sangue in una parte qualunque** del margine giallo dell'area di applicazione grande e ben assorbente.



Espulsione igienica delle strisce reattive

Grazie al **tasto di espulsione**, basta un clic per rimuovere le strisce in maniera rapida, semplice e igienica.


Come eseguire un test della glicemia



1
Lavarsi le mani con acqua calda e sapone e asciugarle perfettamente.



2
Controllare la data di scadenza sulla scatola delle strisce reattive. Non usare le strisce reattive che hanno superato la data di scadenza.

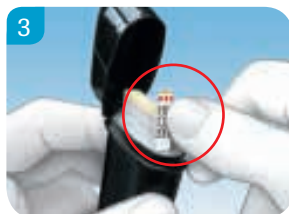

3
Esercitando una leggera pressione **con il pollice**, spingere verso l'alto una striscia reattiva e prelevarla. Quindi, richiudere fermamente il tappo.



4
Inserire la striscia reattiva seguendo la direzione della freccia. In questo modo, l'apparecchio si accende automaticamente.



5
Toccare con l'estremità gialla della striscia reattiva la goccia di sangue. Non applicare il sangue sulla parte superiore della striscia reattiva. Allontanare il dito dalla zona reattiva non appena il messaggio **Test in corso** appare sul display.



6
Sul display viene visualizzato il risultato del test entro 4 secondi. Se si desidera evidenziare questo valore, azionare il tasto **OK**. In caso contrario proseguire con il punto 8.



7
Premere il tasto ▼ per selezionare il simbolo desiderato. Premere **OK** per confermare il simbolo da assegnare al risultato del test.



8
Premere questo tasto per espellere la striscia reattiva dall'apparecchio. Premere per 3 secondi il tasto **OK** o attendere 15 secondi: l'apparecchio si spegne.

Spesso sono le piccolezze...

... che trasformano in una seccatura la misurazione della glicemia. Provare a **prelevare una striscia reattiva frettolosamente, eseguire un test con discrezione** quando è troppo buio per vedere qualcosa, **mancare la piccola area di applicazione, annotare i risultati dei test a mano**, ... può essere veramente frustrante.

Il nuovo sistema Accu-Chek® Guide è progettato per ridurre le complicazioni delle misurazioni quotidiane della glicemia, sia che tu stia andando al lavoro, sia che tu stia godendoti l'aria aperta o passando un po' di tempo con la tua famiglia.



Accu-Chek® Guide

Intelligente e semplicemente pratica.



Per avere maggiori informazioni sul sistema intelligente e semplicemente pratico Accu-Chek Guide, visita il sito www.accu-chek.ch/guide.

* Il 95% dei singoli risultati per il glucosio ottenuti da gruppi di 3 strisce reattive differiscono di $\pm 0,56$ mmol/L (10 mg/dL) dai risultati del metodo di riferimento del produttore a concentrazioni di glucosio $< 5,6$ mmol/L (100 mg/dL), e del $\pm 10\%$ a concentrazioni $\geq 5,6$ mmol/L (100 mg/dL).

1 Brazg RL, et al. New Generation Blood Glucose Monitoring System Exceeds International Accuracy Standards. J Diabetes Sci Technol. June 2016.

Experience what's possible.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE ACCU-CHEK FASTCLIX e ACCU-CHEK CONNECT sono marchi di Roche. © 2016 Roche

www.accu-chek.ch

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz



ACCU-CHEK®